

Analisi dei residui del vaccino Covid-19 (C19VRA)

Questo kit include:

- 1 busta preindirizzata (per l'invio del campione al laboratorio)
- 1 foglio di carta da filtro (per la goccia di sangue)
- 1 bustina
- 2 lancette pungidito (1 extra in caso di necessità)

Non lavarsi le mani prima di questa operazione né applicare lozioni, alcol, ecc. In tal caso, attendere 5-10 minuti prima di prelevare un campione di sangue.

Non scrivere sulla carta bianca.

Scrivere nome, cognome (cognome da sposata se sposata) e data di nascita all'esterno della busta piccola.

Includere anche numero di telefono ed e-mail.

Se si è ricevuto una trasfusione di sangue negli ultimi 5 anni, indicare la data approssimativa dell'ultima trasfusione.

Pungere un polpastrello o chiederete a qualcuno di pungere il lobo dell'orecchio (molte persone affermano che il lobo dell'orecchio sia meno doloroso). Per i bambini molto piccoli (sotto i 3 anni), è meno doloroso e più facile pungere il tallone.

Rimuovere il tappo blu della lancetta ruotandolo di 90 gradi e poi estrarlo.

È a molla e si attiva premendo la parte superiore blu. Una volta premuto il pulsante, non può essere premuto di nuovo!

C'è una piccola area in cui la si può afferrare con le dita per poi premere con il pollice.

L'ago è impostato a una profondità specifica e poi si ritrae.

Applicare/strisciare 1-2 gocce di sangue vicino a un'estremità della carta.

Lasciare asciugare per 10-15 minuti. Inserire nella busta piccola, quindi inserire nella busta preindirizzata e rispedire.

I risultati sono disponibili in 3-5 giorni lavorativi dal ricevimento del campione.